

کاشف یار

محصول مشترک دانش بنیان بهارزیست و پلیس مبارزه با مواد مخدر



کاربرد : تشخیص مواد مخدر و روانگردان

چگونگی عملکرد: وجود مواد مخدر و روانگردان را می توان با تغییر رنگ کیت تشخیص داد.

بسته به نوع دارو و یا مواد مخدر رنگهای مختلفی کمتر از ۳۰ ثانیه آشکار می شود.

شرایط نگهداری: عمر مفید کیت بر روی بسته بندی درج شده است. کیت ها را دور از نور

مستقیم خورشید قرار داده، کیت در محدوده دمایی ۲۰- الی ۵۵ درجه سانتی گراد بدون تغییر

پایدار است.

میزان دقت : این روش دارای حد تشخیص پایین در حدود کمتر از ۳ میلی گرم است.

هشدارها :

۱- لطفا راهنمای استفاده از کیت را قبل از استفاده به دقت مطالعه نمایید .

۲- کیت دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

۳- محتویات داخل آمپول تماس مستقیم با پوست نداشته باشد.

۴- در صورت تماس با چشم، پوست یا لباس، فوری با آب سرد فراوان شستشو شود.

۵- پس از مصرف و انجام آزمایش، محتویات کیت را ترجیحا داخل پلاستیک قرار داده و سپس در

سطل زباله وارد کنید.

هر بسته حاوی ۱۰ عدد شیشه آمپول پلمپ شده/آمپول شکن/۱۰ عدد قاشقک/راهنمای استفاده


روش انجام تست




۴ بعد از استفاده، آمپول را داخل سطل زباله بیاندازید.



۳ رنگ معرف را با خطوط رنگی چاپ شده راهنما یا بسته بندی مقایسه نمایید.

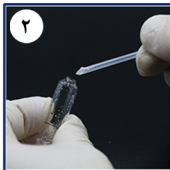

۲ با استفاده از قاشقک ماده مشکوک را وارد آمپول کنید.

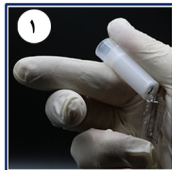

۱ قسمت بالای آمپول را بین انگشت شصت و اشاره بگیرید و با آمپول شکن از قسمت بالایی آن جدا کنید.



هروئین / مورفین
متادون
آمفتامین
متامفتامین
سودو ادرین
پاراستامول
ترامادول
کتامین
کوبائین
اکستازی