

سیفتی باکس بیمارستانی

جهت جمع آوری پسماندهای تیز و برنده پزشکی

Sharp Container

To collect sharp and medical waste

شماره کاتالوک BZT90

مورد استفاده مدیریت پسماند

کاربرد

ظرف یکبار مصرف محکم و مقاوم به سوراخ شدگی با دهانه گشاد برای جمع آوری پسماندهای تیز و برنده پزشکی است.

مقدمه

سیفتی باکس با نام علمی sharp container ظرفی است از مواد پلیمری و کاملاً یکبار مصرف با قابلیت نگهداری و حفظ پسماندهای تیز و برنده و همچنین سرنگهای پزشکی که پس از پر شدن تا خط نشانه توسط درپوش قرمز رنگ کاملاً پلمپ شده و سپس دفع بهداشتی میشود. مواد بکاررفته امکان بازگشت سیفتی باکس به طبیعت را پس از دفع و سوزاندن فراهم میکند و کاملاً برای محیط زیست بی خطر است.

ویژگیهای محصول

- ✓ دهانه تعبیه شده بروی درب قرمز رنگ که توسط قسمت متحرک باز و بسته میشود امکان استفاده از محصول را فراهم مینماید.
- ✓ درب متحرک به گونه ایست که در حالت باز ایجاد ابعاد مناسب برای وارد شدن ساده اشیا با هدایت دست به داخل آن مینماید و در در حالت بسته امکان خروج آنها را در صورت سقوط احتمالی به حداقل میرساند.
- ✓ روی سطح صاف ظرف یک خط نشانه ایجاد شده است. این خط نشانگر حداکثر ظرفیت میباشد.
- ✓ شیارهای تعبیه شده روی دهانه ورود این امکان را به مصرف کننده میدهد که با یک دست و بدون آلوده شدن دست و قسمتهای دیگر سیفتی باکس اشیا تیز را با توجه به سایز و شکل شی محکم کرده و آنها را از پایه جدا کند.

✓ سیفتی باکس را میتوان بوسیله هولدر که با توجه به حجمهای متفاوت اندازههای متفاوت دارد به دیوار متصل کرد که پس از پر شدن میتوان آن را برداشت و سیفتی باکس جدید را داخل آن قرار داد. این امر از حرکت سیفتی باکس در هنگام استفاده از شیارها برای جداسازی اشیاء تیز و برنده جلوگیری به عمل می آورد. و از لحاظ ایمنی مناسب است.

اشکال محصول

سیفتی باکس شرکت بهار زیست آزما پژوه در ۴ اندازه عرضه می شود.

سیفتی باکس 3 لیتری قابل نصب بر روی دیوار و ترائی ارتفاع: ۱۸ سانتی متر قطر: ۱۸ سانتی متر تعداد در کارتن: ۸۱ 	✓ اشغال فضای کم ✓ سبک و با قابلیت حمل آسان ✓ قابلیت مونتاژ آسان درب و بدنه ✓ دارای قفل دو مرحله‌ای برای درب :: قفل موقت و دائم ✓ دارای دسته ارگونومیک برای حمل آسان ✓ دارای شیارهای تعبیه شده در درب برای جداسازی آسان سر سوزن ها ✓ قابلیت نصب روی میله یا دیوار با استفاده از پایه پلاستیکی ✓ قابل استفاده در آمبولانس و مراکز سیار
سیفتی باکس 5 لیتری قابل نصب بر روی دیوار و ترائی ارتفاع: ۲۴ سانتی متر قطر: ۱۸ سانتی متر تعداد در کارتن: ۳۶ 	✓ قابلیت مونتاژ آسان درب و بدنه ✓ سبک و با قابلیت حمل آسان ✓ دارای قفل دو مرحله‌ای برای درب :: قفل موقت و دائم ✓ دارای دسته ارگونومیک برای حمل آسان ✓ دارای شیارهای تعبیه شده در درب برای جداسازی آسان سر سوزن ها ✓ قابلیت نصب روی میله یا دیوار با استفاده از پایه پلاستیکی ✓ دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

سیفتی باکس 7 لیتری

7

قابل نصب بر روی دیوار و ترالی

ارتفاع: ۱۷,۵ سانتی متر

قطر: ۲۵ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۴۰



- ✓ برخورداری از تعادل بالا (به دلیل داشتن مقطع وسیع)
- ✓ قابلیت مونتاژ آسان درب و بدنه
- ✓ دارای قفل دو مرحله‌ای برای درب :: قفل موقت و دائم
- ✓ دارای دسته ارگونومیک برای حمل آسان
- ✓ دارای شیارهای تعبیه شده در درب برای جداسازی آسان سر سوزن ها
- ✓ قابلیت نصب روی میله یا دیوار با استفاده از پایه پلاستیکی
- ✓ دارای خط نشانگر حداکثر گنجایش مجاز

سیفتی باکس 12 لیتری


12

قابل نصب بر روی دیوار و ترالی

ارتفاع: ۲۹ سانتی متر

قطر: ۲۵ سانتی متر

تعداد در کارتن: ۳۲

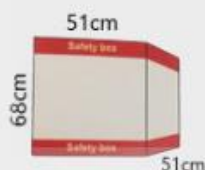

- ✓ قابل استفاده برای دفع انواع کانتینر، کانولا و لوله
- ✓ برخورداری از تعادل بالا :: به دلیل داشتن مقطع وسیع
- ✓ قابلیت مونتاژ آسان درب و بدنه
- ✓ دارای قفل دو مرحله‌ای برای درب :: قفل موقت و دائم
- ✓ دارای دسته ارگونومیک برای حمل آسان
- ✓ دارای شیارهای تعبیه شده در درب برای جداسازی آسان سر سوزن ها
- ✓ قابلیت نصب روی میله یا دیوار با استفاده از پایه پلاستیکی

نحوه استفاده

- پس از باز کردن درب کارتن به تعداد دلخواه سیفتی باکس (سطل) همراه با درب مورد نظر را از داخل کارتن بردارید.
- دقت فرمایید به تعداد سیفتی باکس، درپوش داخل کارتن قرار داده شده است بنابراین به ازای هر کدام یک درپوش بردارید.
- هر سیفتی باکس می بایست درب داشته باشد.

- درب را روی سطل قرار داده و با فشار نسبتاً محکم آن را جا بیاندازید. دقت فرمایید درب می بایست در دو یا سه مرحله فشار آوردن و آن هم در اطراف درب جا شود. از محکم بودن درب مطمئن شوید.
- سیفتی باکس آماده استفاده می باشد.
- زمانی که سیفتی باکس تا خط نشانه پر شد. درب آن را قفل نمایید.
- نحوه قفل شدن درب: در جهت بسته شدن درب متحرک فشار محکمی وارد نمایید وقتی از عدم برگشت درب در جهت عکس مطمئن شدید درب قفل گردیده است. توجه داشته باشید درب متحرک می بایست یکبار قفل شود پس از قفل کردن اصرار بر فشار بیشتر روی آن نداشته باشید.



سیفتی باکس های تولید شده توسط شرکت بهارزیست آزما پژوه دارای ویژگیها و مزیتها به شرح زیر می باشد:

- سهولت در باز و بسته شدن درب چرخان .
- امنیت و استحکام درب بزرگ در حالت اتصال به سطل .
- استحکام قسمتی که می بایست سر سوزن را در آن قرار داد تا از سرنگ جدا شود .
- کم بودن فضا میان محل درب چرخان و درب ثابت، جهت عدم خروج ضایعات آلوده از داخل سیفتی باکس .
- وجود درپوش که بعد از زمان پر شدن سیفتی باکس روی قسمت بالا قرار می گیرد از مواردی استثنایی است که باعث جلوگیری از بروز هرگونه ریسک و اتفاق در اثر افتادن سیفتی باکس را می نماید، این درپوش در حمل سیفتی باکس بسیار کمک کننده و موثر است.

نکات ایمنی

- سیفتی باکس می بایست روی سطح صاف و بصورت ایستاده استفاده شود.
- سیفتی باکس نباید بیافتد ، چنانچه این اتفاق افتاد بلافاصله آن را بردارید و از عدم خروج هرگونه شی از داخل آن مطمئن شوید.
- هر سیفتی باکس یک خط نشانه جهت حداکثر ظرفیت دارد . هرگاه اشیا داخل آن تا این خط ظرفیت رسید می بایست درب آن قفل شود و درپوش روی آن قرار گیرد.

- بلافاصله که از پر شدن سیفتی باکس مطمئن شدید و درب آن را قفل نموده و به قسمت زباله های بیمارستانی انتقال دهید.

منابع

- ۱- <https://supply.unicef.org/s0782216.html>
- ۲- [/http://www.doe.ir](http://www.doe.ir)
- ۳- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، چاپ اول استاندارد ۸۵۰۲: ظروف یکبارمصرف برای جمع آوری پسماندهای تیز و برنده پزشکی

 بهارزیست آزما پژوه

واحد پشتیبانی و خدمات پس از فروش ۰۲۱-۶۶۵۹۱۱۸۵
کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان،
نخلستان، گلشید ۳ پلاک ۹

www.baharzyst.com